

e Un mail vous sera envoyé, cliquez sur le lien pour valider votre compte. N'hésitez pas à vérifier vos spams.

Votre compte iAdapt



iAdapt <info@laboratoire-lcs.com>
À Docteur LCS

😊 Répondre ↶ Répondre à tous → Transférer 📧 ⋮

jeu. 03/10/2024 10:01

Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

Cher Docteur LCS,

Votre inscription est presque terminée. Pour valider votre adresse Email et vous connecter à iAdapt, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

http://www.iadapt-laboratoire-lcs.com/signin/confirm_mail/2747/60e62a3ae74ebd26f4b295cc53db1bef

Merci d'utiliser iAdapt

Cordialement,
L'équipe iAdapt

Merci de ne pas répondre à cet Email

2. UTILISER IADAPT

a Cliquez sur le type de lentille que vous souhaitez commander.



b Saisissez les informations du patient.

Porteur : Nom : * Marie Prénom : * Dupont Date de naissance : * 01/01/1999 Historique du porteur

c Renseignez les paramètres nécessaires au calcul de la lentille de 1ère intention puis cliquez sur le bouton "Calculer".

Oeil droit

Type de cornée : Régulière ▼

Kératométrie (en mm) : 8.20 10 7.90

Réfraction lunettes : -2.00 Cylindre Axe Add ▼

Diamètre cornéen : 11.5

Matériau : Dk 200 ▼

Commentaires : Commentaires internes, non transmis à LCS.

Calculer Effacer

Une fois calculée, la lentille apparaît ici :



e Après avoir renseigné les paramètres nécessaires au calcul de la lentille, vous avez la possibilité de générer une ordonnance.

2 options s'offrent à vous :

iAdapt™ Lcs Laboratoire Accueil

Porteur : Nom : * DUPONT Prénom : * Marie Date de naissance : * 01/01/2000 Historique du porteur Afficher les observations

OrthoK
Lentille de tête intention Suivi OrthoK

Oeil droit
 Contrôle Myopique : Oui Non
 Kératométrie : 7.00 10 7.00
 Réfraction lunettes (TP) : -2.00 Cylindre Axe
 Excentricité : 0.5 0.5
 Diamètre cornéen : 11.5
 Commentaires : Commentaires internes, non transmis à LCS.
 Calculer Effacer

Oeil gauche
 Contrôle Myopique : Oui Non
 Kératométrie : 7.50 10 7.00
 Réfraction lunettes (TP) : -2.50 -2.00 10
 Excentricité : 0.5 0.5
 Diamètre cornéen : 11.5
 Commentaires : Commentaires internes, non transmis à LCS.
 Calculer Effacer

Oeil droit
AOK (Aeria OK)
Dk 200 Orange
K 7.00 / TP -2.00
ø 10.80
e: 0.5

Oeil gauche
AOK (Aeria OK) Torique
Dk 200 Bleu
K 7.50 K' 7.00 / TP -2.50
ø 10.80
e: 0.5 0.5

Option 1

Générer votre ordonnance via PDF

? Votre ordonnance sera sauvegardée au format PDF.
 Confirmez-vous cette ordonnance ?
 En essai Annuler



Option 2

Copier/coller les paramètres et envoyez-les par mail

📌 Les paramètres ont été copiés dans le presse-papier.
 Vous pouvez les coller dans votre logiciel.
 OK



Prescripteur
 Docteur : Laboratoire Lcs
 Adresse :
 Code postal : 14000
 Ville : Caen - France
 N° RPPS :

Nom du patient : Marie DUPONT (01/01/2000)

ORDONNANCE DE LENTILLES D'ESSAI

Laboratoire LCS

Oeil droit : AOK (Aeria OK)

Dk 200 Orange / K 7.00 / e: 0.5 / TP -2.00 / D Total: 10.80

Oeil gauche : AOK (Aeria OK) Torique

Dk 200 Blue / K 7.50 K' 7.00 / e: 0.5 0.5 / TP -2.50 / D Total: 10.80

Trousse Adaptation OrthoK

MERCI D'APPORTER VOS LENTILLES LORS DE TOUS VOS RENDEZ-VOUS DE CONTROLE

Laboratoire Lcs

Date: 17/10/2024

Envoyer À info@laboratoire-lcs.com
 Cc
 Objet

Bonjour,

Pourriez-vous s'il vous plait enregistrer la commande suivante :

Oeil droit AOK (Aeria OK) Dk 200 Orange K 7.00 / TP -2.00 ø 10.80 e: 0.5 // Oeil gauche AOK (Aeria OK) Torique Dk 200 Bleu K 7.50 K' 7.00 / TP -2.50 ø 10.80 e: 0.5 0.5

Bonne journée,

Laboratoire LCS

+33 2 31 86 66 56

LCS

14 place Gardin

14000 Caen

3. SUIVI D'ADAPTATION

a Pour vos suivis d'adaptation, il est possible de modifier les paramètres d'une lentille précédemment calculée et/ou commandée.

→ Cliquez sur le patient pour lequel vous souhaitez modifier les lentilles ou rechercher son nom dans la barre de recherche :

Recherche porteur :

| Nom | Prénom | Date de naissance |
|--------|--------|-------------------|
| DUPONT | Marie | 01/01/1999 |

→ Cliquez sur le bouton "Modifier ces lentilles"

Historique du porteur

Porteur

Nom : * DUPONT Prénom : * Marie Date de naissance : * 01/01/1999

Historique des commandes

Recherche : Recherche

| Date | Lentille | Sauvegardé | Mode |
|------------|----------|------------|------|
| 02/02/2024 | LRPG | 02/02/2024 | Tran |

Importation topographe

OD

AERIA
Matériau : Dk 200 Bleu
Ro : 8.1
Diamètre : 10.20 mm
Sphère : -3.25
Cylindre : 0
Axe : 000°

OG

AERIA
Matériau : Dk 200 Vert
Ro : 7.9
Diamètre : 10.20 mm
Sphère : -2
Cylindre : 0
Axe : 000°

Accéder à votre calcul **Modifier ces lentilles**

Nouveau calcul

EyeBng SLD AKS LRPG CRT RMC Ocea

Commentaires

Commentaires internes, non transmis à LCS.

Comment utiliser iAdapt ?
Plus d'informations juste ici !

